

UTILIZZO MASCHERINE**INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

E' necessario sottolineare che la protezione viene garantita solo e soltanto se queste sono bene adattate al viso e se questo è privo di barba.

Spesso nell'indossarle bisogna adattare il "nasino" deformabile alla propria conformazione facciale, capelli o la presenza eventuale di occhiali non debbono interferire con la tenuta sul viso.

Come indossare e togliere la mascherina in 10 passaggi:

1
Prima di indossare la mascherina, lavati accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.



2
Con il nasello rivolto verso l'alto, appoggiare la mascherina sul palmo della mano e far passare gli elastici sul dorso della mano.



3
Portare la mascherina sul volto, copri bocca e naso assicurandoti che sia integra e che aderisca bene.



4
Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.



5
Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie.



6
Con entrambe le mani, sistemare il nasello affinché aderisca al naso in modo perfetto.



7
Inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente, l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro.



8
Verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.



9
Togli la mascherina prendendola dagli elastici e non toccare la parte anteriore.



10
Getta immediatamente la mascherina in un sacchetto chiuso e lavati accuratamente le mani.

Il presente documento non sostituisce l'addestramento per l'uso del DPI.